



PREMIUM-RAUMGLAS

MULTIZOOM

DAS FLEXIBLE BRILLENGLAS FÜR NAHE UND MITTLERE SEHBEREICHE

STRATEMEYER
Brillenglasmanufaktur


www.stratemeyer.com

MULTIZOOM – DAS PREMIUM-RAUMGLAS

DAS OPTIMUM FÜR NAHE UND MITTLERE SEHBEREICHE

Das Raumglas MultiZoom ist genau für die Sehanforderungen in den näheren und mittleren Sehentfernungen designt worden. Es überzeugt durch besonders breite Sehbereiche, führt zu entspanntem Sehen und beugt somit gesundheitlichen Problemen vor.

Gerade im Alltag verrichtet man immer wieder die gleichen Tätigkeiten und bewegt sich in einem gleichbleibenden Umfeld, ob privat oder beruflich. MultiZoom wird speziell für diese definierten Sehentfernungen angefertigt. Maßgeblich sind die Abstände zu Gegenständen bzw. Personen. Definiert wird jeweils die kürzeste und weiteste Entfernung in der alltäglichen Umgebung. Die Zwischenbereiche werden danach optimal an die speziellen Sehanforderungen angepasst.

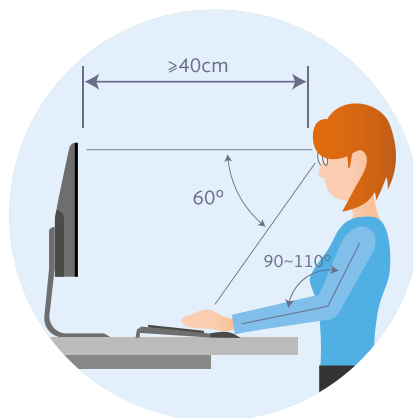

DIE PRAXIS

Durch Angabe der persönlichen Arbeitsbereiche wird die maßgeschneiderte Brille gestaltet. Anzugeben ist die individuelle Sehentfernung zwischen 2 m und 6 m (frei wählbar).

ENTFERNUNGSANGABE 2 m:

Die ideale **Bildschirmarbeitsplatzbrille**, perfekt für Computer und Schreibtisch

ENTFERNUNGSANGABE 4 m:


Eine hervorragende **Arbeitsplatzbrille**, geeignet für die Arbeit am Schreibtisch und gleichzeitigem Kontakt mit Kunden oder Kollegen

ENTFERNUNGSANGABE 6 m:

Eine **Raumbrille**, perfekt für flexible Tätigkeiten von Computerarbeit bis zur Besprechung und Bewegung im Raum

DEFINIEREN SIE EINEN SEHBEREICH

Die unten stehende Grafik verdeutlicht die Auswahl an Hauptsehbereichen, von denen einer optimiert werden kann.

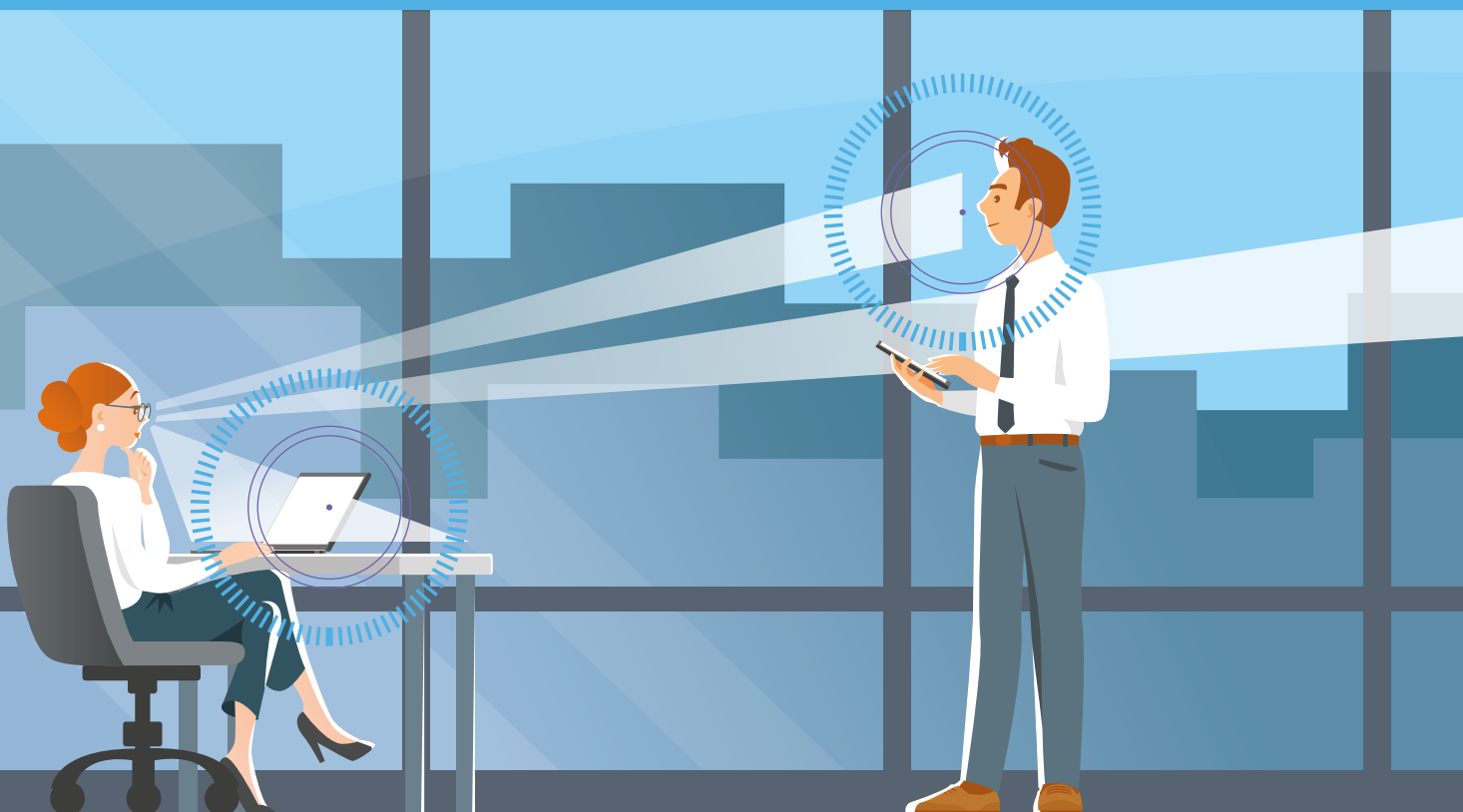

MultiZoom bis 2,00 m

MultiZoom bis 4,00 m

SEHEN IM UMFELD VON DIGITALEN GERÄTEN

VIelfÄLTIG UND INDIVIDUELL

MultiZoom ist in einer großen Materialvielfalt erhältlich und stellt so die Einsatzmöglichkeit in vielen Umfeldern sicher. Immer wichtiger dabei das Material UV420 mit Schutz vor hochenergetischem blau-violetttem Licht.


UV420 UND DIGITALTEC – UNSICHTBARER SCHUTZ

Das dauerhafte Einwirken von kurzwelligem, sichtbarem Licht kann schädlich für unsere Augen sein bzw. Krankheiten begünstigen. Gefährdende Strahlungsquellen im Raum sind u. a. Displays und Bildschirme.

Durch das Brillenglasmaterial UV420 inkl. dem Protektionsveredelungssystem DIGITALtec ist nicht nur ein 100%iger UV-Schutz garantiert, sondern darüber hinaus werden die Augen vor hochenergetischem blau-violetttem Licht geschützt.

EIGENSCHAFTEN VON UV420 MIT DIGITALTEC

- Kosmetisch angenehme Glasgrundtönung mit Blaulichtfilter
- 100 % UV-Schutz
- Reduzierung des hochenergetischen blau-violetten Lichts
- Mit Funktionsveredelungen DIGITALtec – Protektionsveredelungssystem inkl. Hartschicht, Superentspiegelung, blaulichtreduzierender Funktionstönung

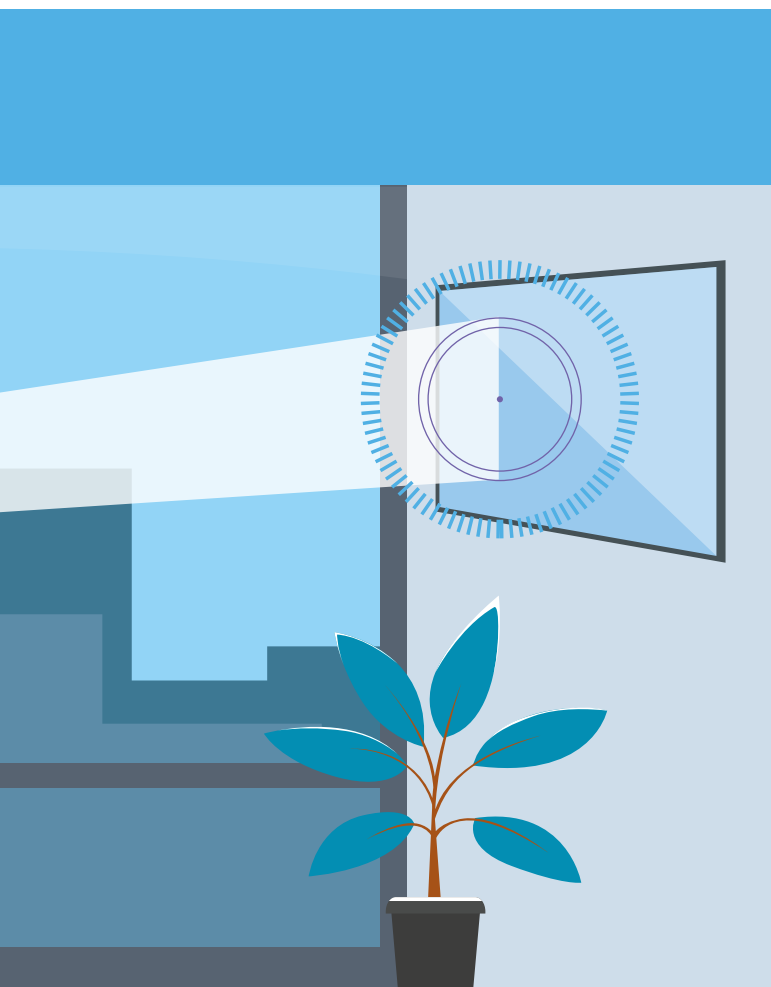

MultiZoom bis 6,00 m

WERBEMATERIALIEN

Für verkaufsunterstützende Werbematerialien besuchen Sie gerne unseren Werbemittelshop im Kundenbereich auf unserer Website www.stratemeyer.com.

DER GESUNDHEIT ZULIEBE

GESUNDHEITLICHEN PROBLEMEN VORBEUGEN

Nah und mittlere Sehbereiche zwischen 30 cm und 6 m spielen sowohl im Berufsleben als auch im privaten Alltag eine besonders wichtige Rolle. Alltagsbrillen sind für diese Entfernungen ungeeignet.

Ein Bildschirm steht im Schnitt in 0,80 m – 0,90 m Entfernung. Eine Lesebrille ist für einen typischen Leseabstand von 0,30 m – 0,40 m konzipiert und stößt deshalb hier an ihre Grenzen. Bei einer universellen Gleitsichtbrille würde man bei habitueller Körperhaltung beim Blick auf den Bildschirm den zu schmalen Progressionskanal im mittleren Bereich des Glases nutzen. Um zu einen breiteren Sehbereich zu gelangen, muss man dann tendenziell den Kopf um 20 Grad nach oben anheben.

Unkomfortable Kopfbewegungen führen zu einer Überanstrengung der Augen und zu unnatürlicher Kopf- und Körperhaltung. Die Folge sind vielfältige gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen, Verspannungen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und Haltungsschäden.

MultiZoom ist die ideale Alternative – ein an die individuellen Sehanforderungen angefertigte Raumbrylle.



Die **Kostenübernahme** für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille durch den Arbeitgeber ist im § 6 der BildscharbV geregelt.



Klare Bereiche einer Standard-Lesebrille



Klare Bereiche einer Standard-Gleitsichtbrille



Klare Bereiche einer Bildschirmbrille mit MultiZoom-Raumgläsern

TECHNISCHE HINWEISE

REFRAKTION

Die Fernrefraktion erfolgt wie gewohnt im Unendlichen. Die Addition muss für die Grundvariante in 0,35 m gemessen werden. Wenn eine davon abweichende minimale Sehentfernung benötigt wird, muss die Addition in der erforderlichen minimalen Sehentfernung bestimmt werden.

BESTELLUNG

MultiZoom wird wie ein herkömmliches Gleitsichtglas bestellt. Folgende Optionen für die Sehentfernung sind möglich:

	MIN	Standard	MAX
Ferne	1,20 m	2,00 m	6,00 m
Nähe	0,30 m	0,35 m	0,60 m

VERTRÄGLICHKEIT

MultiZoom wird sehr gut vom Brillenträger angenommen und ist wegen seiner hohen Verträglichkeit sehr beliebt.


Zur Individualisierung mit Caractère können Sie folgende zusätzliche Angaben machen: Minimale Sehentfernung (0,20 m – 1,20 m), PD, HSA, Vorneigung, Fassungs-scheibenwinkel, Basiskurve, Inset.



HINWEIS: MultiZoom ist nicht straßenverkehrstauglich!


MULTIZOOM-RAUMGLÄSER AUF EINEN BLICK

DIE UNSCHLAGBAREN ARGUMENTE:




- Perfekte Arbeitsplatzbrille und optimale Ergänzung zur Gleitsichtbrille
- Individuell und für den benötigten Sehbereich optimiert
- Hoher Sehkomfort dank des sehr breiten Nah- und Zwischenbereichs mit natürlichen Übergängen
- Beste Spontanverträglichkeit
- Unkompliziert
- Brillante Abbildung
- Unterstützung einer ergonomischen Körperhaltung und Vorbeugung gesundheitlicher Probleme
- Große Materialvielfalt, u. a. mit dem Blaulichtdämpfer UV420 veredelbar
- Mehrbrillenrabatt
- Made in Germany mit kurzen Lieferzeiten 



 Mehrbrillenrabatt 50 %

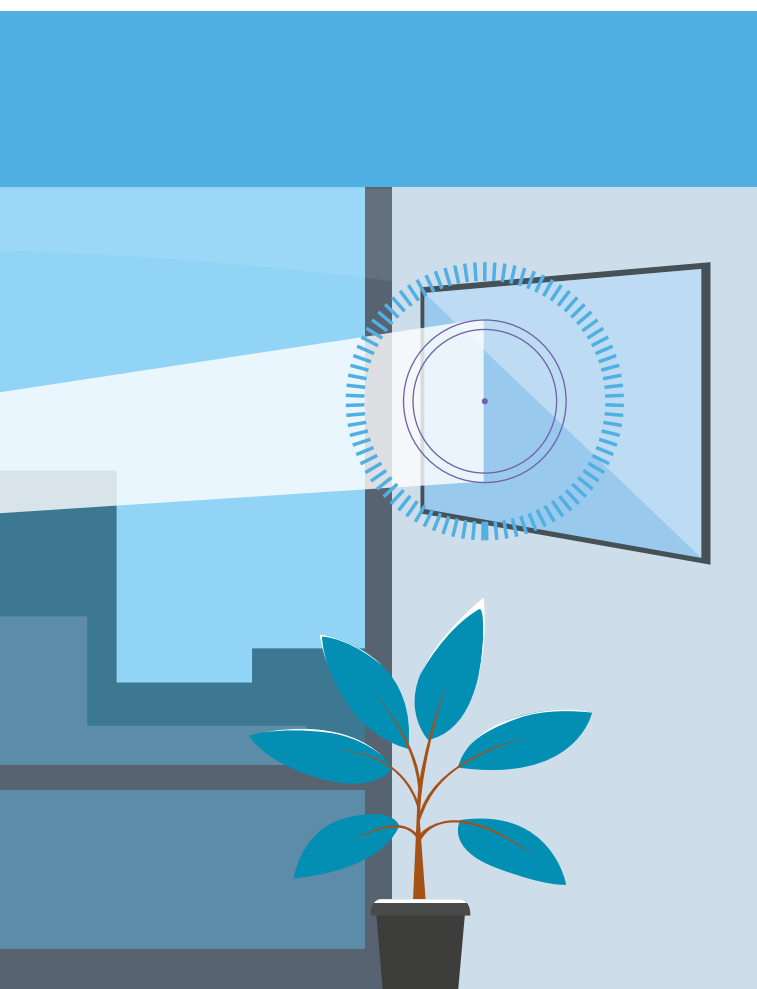

MultiZoom bis 6,00 m

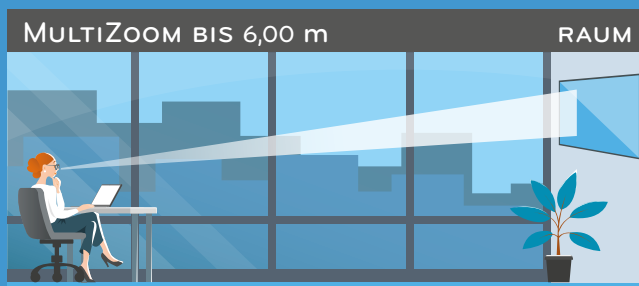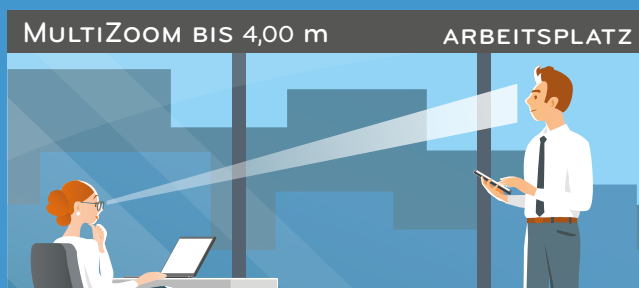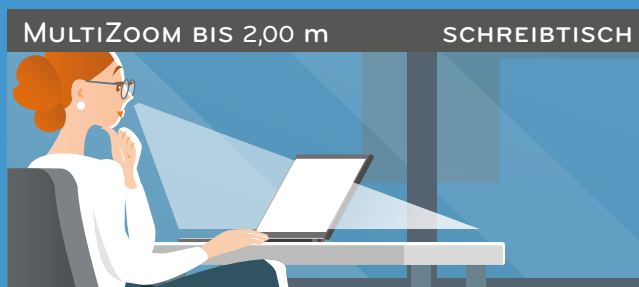



Brillengläser mit einzigartigem Charakter für
Brillenträger mit eigenem Kopf – Made in Germany.

STRATEMEYER
Brillenglasmanufaktur

Eugen Stratemeyer GmbH & Co. KG
Vierhausstraße 79 a+b • 44807 Bochum

E-Mail: service@stratemeyer.com
Fax: 0800 50690-93
Web: www.stratemeyer.com

Kostenlose Hotline: 0800 50690-92